

Eifix® Leocid Spray

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion

Stand: 16.10.2017

Eigenschaften

- Bakterizid inkl. MRSA, levurozid
- Tuberkulozid
- Viruzid inkl. Polie-, Adeno-, Rota- und Noro-Viren
- Parfümfrei

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion. Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendung / Dosierung

Für die Flächenwischdesinfektion eine ausreichende Menge auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen damit abwischen. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig mit dem Desinfektionsmittel benetzt sein. Starke Verunreinigungen sind zunächst mit einem Desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch zu entfernen. Anschließend kann die Desinfektion mit Eifix® Leocid Spray erfolgen. Nach Ablauf der Einwirkzeit können die Oberflächen mit einem sauberen Einmaltuch trocken nachgewischt werden.

Hinweis: Für alle alkoholbeständigen Oberflächen geeignet. Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA).

Wirkspektrum und Einwirkzeiten:

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion) gem. DGHM/ VAH (bakterizid, levurozid, hohe organische Belastung) – 1 Min.

Tuberkulozid (M. terrae) gem. EN 14348 – 30 Sek.

Viruzid gem. EN 14476 inkl. HBV/ HIV/ HCV, Polio-, Norovirus (MNV) – 1 Min.

Adeno-, Rota-Virus – 30 Sek.

Inhaltsstoffangabe

< 5 % nichtionische Tenside. Weitere Angaben: Desinfektionsmittel. Zusammensetzung: 100 g enthalten als Biozid wirksamen Bestandteil 60 g Ethanol.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf dem Gebinde.

BAuA Reg.-Nr.: N-74170. BAuA Reg.-Nr.: N-74171.

Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	nach: Alkohol
pH-Wert:	4
Dichte:	0,87 g/cm ³

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Eifix® Leocid Spray

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion

Stand: 16.10.2017

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Flamme; Ausrufezeichen
Entz. Fl. 2; Augenreiz. 2

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.